

Desinfektioaine lääkinällisille invasiivisille ja ei-invasiivisille laitteille erittäin laajalla vaikutuskirjolla



Käyttökohteet ja käyttöohjeet

Nämä käyttöohjeet on luettava yhdessä tuotteen etiketin ja käyttöturvallisuustiedotteen kanssa.

Rely+On™ PeraSafe™ on tarkoitettu käytettäväksi jäykille ja taipuisille endoskoopeille, katetreille, muuntimille ja muille lämpöherkille instrumenteille ja laitteille. Jos haluat luettelon valmistajan hyväksynnöistä, ota yhteys paikalliseen edustajaan. Ei saa käyttää materiaaleihin, jotka sisältävät kuparia, messinkiä, pehmeää terästä, luonnonkumia, nitrilikumia tai EPDM-kumia eikä luonnonharjaksista valmistettuihin hammasharjoihin.

Käytä aina sopivaa silmiensuojainta käsitellessäsi Rely+On™ PeraSafe™ -valmisteen jauhetta ja käyttövalmiita liuoksia. Jos todennäköisesti joudutaan kosketuksiin jauhepölyjen kanssa, on varmistettava riittävä ilmastoitu ja/tai hengityksen suojus (esim. kirurgin kasvosuojus).

Rely+On™ PeraSafe™ -liuoksia voidaan käyttää enintään 20 upotukseen tai 12 tunnin ajan sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Instrumentit on puhdistettava perusteellisesti etukäteen lääke-laatuksella pH-neutraalilla pesuaineella kaiken näkyvän lian poistamiseksi, minkä jälkeen ne on huuhdeltava perusteellisesti vedellä pesuaineen poistamiseksi kokonaan ennen desinfiointia Rely+On™ PeraSafe™ -valmistella. Varmista, että kaikki laitteen pinnat ovat kosketuksissa liuokseen. Erittäin likaantuneet instrumentit voivat aiheuttaa peretikkahapon laadun nopeampaa heikkenemistä, mikä voi vähentää upotusten enimmäismäärää.

Koostumus

Vaikuttava aine: peretikkahappo, tuotettu paikan päällä (n. 0,25% paino/tilavuus (w/v), 162 g/litra), pinta-aktiiviset aineet, korroosio-nestoaine, apuaineet.

Rely+On™ PeraSafe™ -valmistetta on säilytettävä suljetussa alkuperäisessä säiliössä, mieluiten enintään 25°C:n lämpötilassa ja 60%:n suhteellisessa kosteudessa. Lyhytaikainen varastointi enintään 30°C:n lämpötilassa ja 65%:n suhteellisessa kosteudessa ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn. Valmista vain etiketissä olevan ohjeen mukaisia laimennoksia 162 g / litra. ÄLÄ tee vahvempia liuoksia laimennettavaksi myöhemmin.

Aktivoidun Rely+On™ PeraSafe™ -liuoksen valmistelu ja käyttö instrumenttien desinfiointiin Rely+On™ PeraSafe™ -valmisteen suorituskyky ja turvallisuus on validoitu tässä asiakirjassa kuvatuissa käyttöolosuhteissa. Noudata aina ohjeita tuotteen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Rely+On™ PeraSafe™ tehoaa bakteereihin, bakteeri-itiöihin, mykobakteereihin, viruksiin ja hiivoihin, kun kontaktiaika on 10 minuuttia.

HUOM! Mikäli käytön tarkoituksena on tuhota sienet eli saavuttaa fungisidinen teho, niin PeraSafen kemiallinen desinfektioaika upottamalla on 60 minuuttia. Tähän käyttötarkoitukseen käyttöliuos säilyy tehokkaana 8 tuntia valmistuksesta.

Rely+On™ PeraSafe™ -liuoksen (1,62% w/v) valmistelu ja käyttö

1. Lisää yksi pussi (16,2 g) Rely+On™ PeraSafe™-jauhetta yhteen litraan kädenlämpöistä vettä (30-35°C). Älä valmista alle 1 litran liuoksia.
2. Aktivointi kestää 15 minuuttia. Sekoita ajoittain koko tämän aktiivintajakson ajan. Liuos on väritöntä noin 30 minuutin kuluttua. Odotettavissa on pieni määrä liukenematonta materiaalia.
3. Rely+On™ PeraSafe™ -liuoksia tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä (20 ± 5°C). Rely+On™ PeraSafe™-valmistetta voidaan kuitenkin käyttää välittömästi aktivoinnin jälkeen, kun liuos jäähtyy huoneenlämpöiseksi.
4. Rely+On™ PeraSafe™ -liuosta voidaan käyttää staattisessa kylvyssä. Upota instrumentit liuokseen täsmälleen 10 minuutiksi, minkä jälkeen ne on huuhdeltava perusteellisesti steriilillä vedellä. Kaikki Rely+On™ PeraSafe™ -liuoksen jäämät on poistettava ja instrumentit kuivattava.

On suositeltavaa, että Rely+On™ PeraSafe™ -liuoksia ei valmisteta aiemmin kuin tunti ennen käyttöä. Käytetty Rely+On™ PeraSafe™ -liuos voidaan hävittää ilman erityisiä varotoimia normaalissa nestemäisen jätteen käsittelyjärjestelmässä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Lisätietoja turvallisuudesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

Rely+On™ PeraSafe™ 16,2 g

Tuotenumero: 7711
Myyntierä: 10 pussia/purkki
Lava: 300 purkkia
GTIN vähittäistuote: 5030157001310
GTIN kuljetuspakkaus: 5030157009101

Valmistaja

Antec International Limited
Windham Road, Sudbury,
CO10 2XD, UK